




## kalçaprotezkatalogu

**tst**


Orthopedic Implants

# A. UNİPOLAR BAŞ

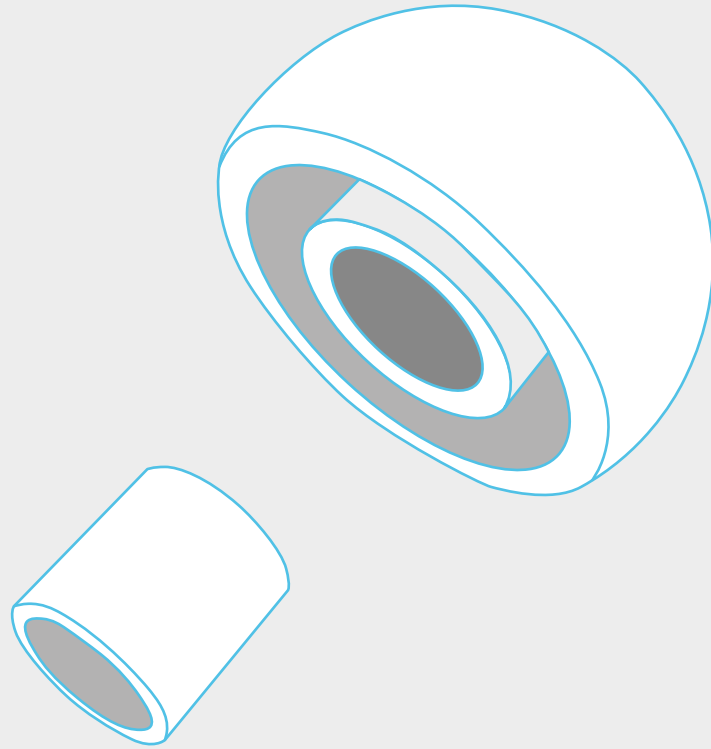

# Enstrümanlar

No	Kod	UBB	İsim	Adet
	00000501100	8699931023954	1.DESIGN TRAY	
1	01192000010	8698673495401	FEMORAL HEAD EXTRACTOR	Femur Baş Çıkartıcı 1
2	01190000101	8699931030990	FEMORAL HEAD MEASUR.DEVICE	Femur Baş Ölçme Aleti 1
3	01195000010	8698673496262	BIPOLAR INSERT RING FORCEPS	Bipolar İnsert Çember Pense 1
4	01192000011	8698673495395	FEMORAL HEAD IMPACTOR	Femur Baş Çakıcı 1
5	01192000039	8698673438484	STEM RING EXTRACTOR	Stem Yüzük Çıkartıcı 1
6	01192000038	8698673438408	A. UNIPOLAR RING EXTRACTOR	A. Unipolar Yüzük Çıkartıcı 1
7	01191001416	8699931023237	A.UNIPOLAR TRIAL HOLDER (12\14-14\16)	A. Unipolar Deneme Tutucu 1
8	01071160060	8698673438446	A. UNIPOLAR RING TRIAL X LARGE	A. Unipolar Yüzük Deneme XL 1
	01071160030	8698673438415	A. UNIPOLAR RING TRIAL LARGE	A. Unipolar Yüzük Deneme L 1
	01071160000	8698673438422	A. UNIPOLAR RING TRIAL MEDIUM	A. Unipolar Yüzük Deneme M 1
	01071160003	8698673438439	A. UNIPOLAR RING TRIAL SMALL	A. Unipolar Yüzük Deneme S 1
	01071160006	8698673438453	A. UNIPOLAR RING TRIAL X SMALL	A. Unipolar Yüzük Deneme XS 1
9	01071150040	8698673438316	A. UNIPOLAR TRIAL 40 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150042	8698673438323	A. UNIPOLAR TRIAL 42 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150044	8698673438330	A. UNIPOLAR TRIAL 44 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150046	8698673438347	A. UNIPOLAR TRIAL 46 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150048	8698673438354	A. UNIPOLAR TRIAL 48 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150050	8698673438361	A. UNIPOLAR TRIAL 50 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150052	8698673438378	A. UNIPOLAR TRIAL 52 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150054	8698673438385	A. UNIPOLAR TRIAL 54 MM	A. Unipolar Deneme 1
	01071150056	8698673438392	A. UNIPOLAR TRIAL 56 MM	A. Unipolar Deneme 1

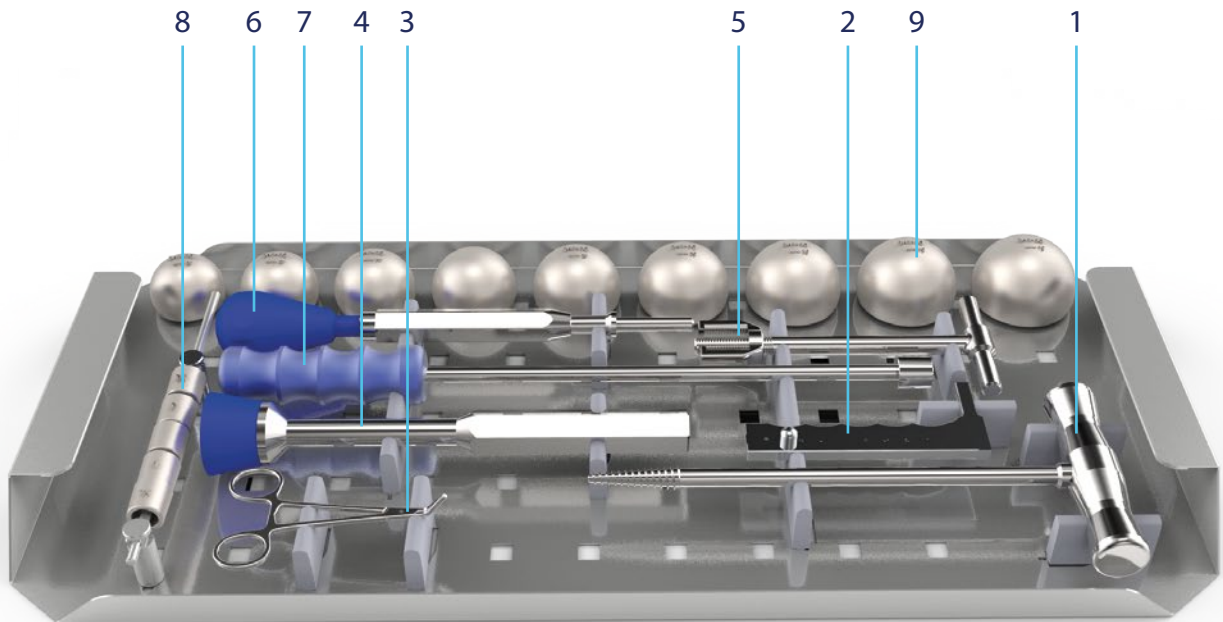


# İmplantlar

	Kod	UBB	İsim	Adet
A.Unipolar Baş Çelik	10711501240	8698673437531	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 40 MM 12-14	1
	10711501242	8698673437555	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 42 MM 12-14	1
	10711501244	8698673437579	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 44 MM 12-14	1
	10711501246	8698673437593	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 46 MM 12-14	1
	10711501248	8698673437616	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 48 MM 12-14	1
	10711501250	8698673437630	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 50 MM 12-14	1
	10711501252	8698673437654	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 52 MM 12-14	1
	10711501254	8698673437678	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 54 MM 12-14	1
10711501256	8698673437692	A. UNIPOLAR HEAD STEEL 56 MM 12-14	1	
A.Unipolar Yüzük Çelik	10711600006	8698673437722	A. UNIPOLAR RING STEEL 12-14 X SMALL	1
	10711600003	8698673437715	A. UNIPOLAR RING STEEL 12-14 SMALL	1
	10711600000	8698673437708	A. UNIPOLAR RING STEEL 12-14 MEDIUM	1
	10711600030	8698673437739	A. UNIPOLAR RING STEEL 12-14 LARGE	1
	10711600060	8698673437746	A. UNIPOLAR RING STEEL 12-14 X LARGE	1
A.Unipolar Yüzük Titanyum	10721600006	8698673437777	A. UNIPOLAR RING TITANIUM 12-14 X SMALL	1
	10721600003	8698673437760	A. UNIPOLAR RING TITANIUM 12-14 SMALL	1
	10721600000	8698673437753	A. UNIPOLAR RING TITANIUM 12-14 MEDIUM	1
	10721600030	8698673437784	A. UNIPOLAR RING TITANIUM 12-14 LARGE	1
	10721600060	8698673437791	A. UNIPOLAR RING TITANIUM 12-14 X LARGE	1

## A. Unipolar Baş Uygulaması

### 6 A. UNİPOLAR DENEMESİ

Önceden femur başı ölçümüyle (Bölüm 2) genişliği tespit edilen **A. Unipolar Denemesi (A. Unipolar Trial)**, **A. Unipolar Deneme Tutucusuna (A. Unipolar Trial Holder)** takılarak asetabulumu uygunluğu test edilir.

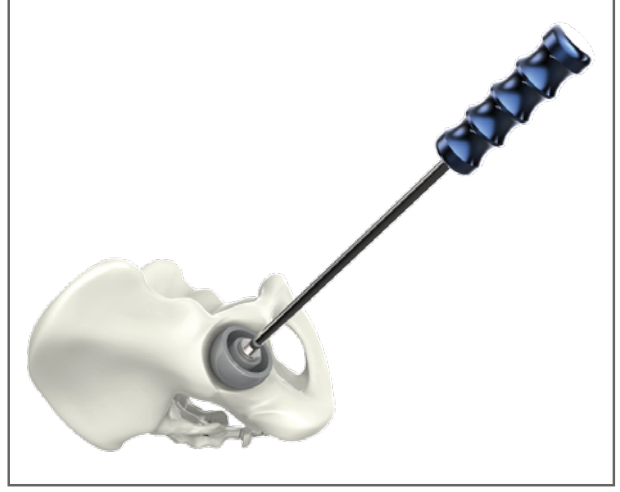


### 7 YÜZÜK ÖLÇÜSÜ TESPİTİ


Raspaya takılan **Deneme Yüzük (A. Unipolar Ring Trial)** üzerine, ölçüsü tespit edilen **A. Unipolar Denemesi (A. Unipolar Trial)** yerleştirilip uygun yüzük ölçüsü tespit edilmeye çalışılır.



### 8 HAREKET TESTİ

Denemeler takıldıktan sonra bacak hareketleri kontrol edilerek ölçülerin uygun olup olmadığı test edilir.

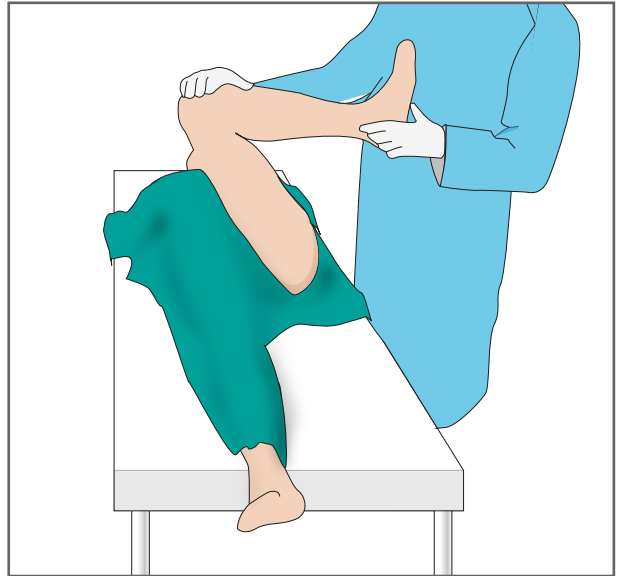

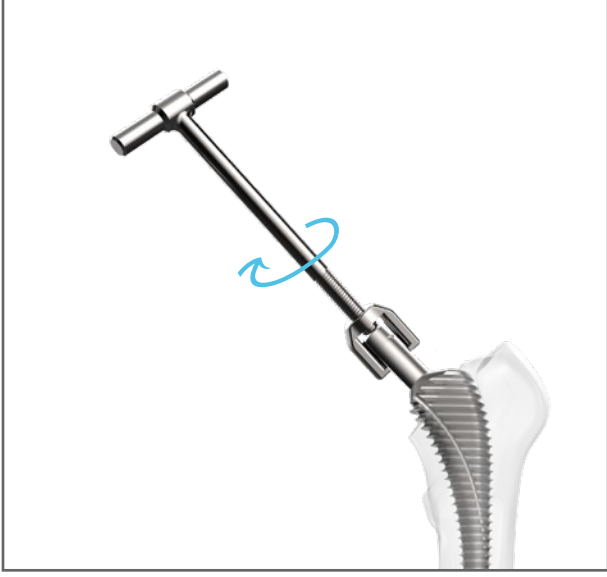

## 9 DENEME YÜZÜĞÜNÜN ÇIKARILMASI Raspadan Çıkarılması

Raspaya takılan *Deneme Yüzük (Ring Trial)*, *Stem Yüzük Çıkarıcısıyla (Stem Ring Extractor)* resimde gösterildiği gibi çıkarılır.

*Denemeler çıkana kadar enstrümanı çevirin.*



### A. Unipolar Denemesinden Çıkarılması

A. *Unipolar Denemesine (A. Unipolar Trial)* takılan *Deneme Yüzük (Ring Trial)*, A. *Unipolar Yüzük Çıkarıcısıyla (A. Unipolar Ring Extractor)* resimde gösterildiği gibi çıkarılır.

*Yüzük çıkana kadar enstrümanı çevirin.*



## 10 STEMİN YERLEŞTİRİLMESİ

Rotasyon kontrollü *Anteversiyon Koluna (Anteversiyon Rod)* takılı *Stem Çakıcısıyla (Rotation Controlled Stem Impactor)* stem, anteversiyon açısına göre pozisyonlandırılarak yerleştirilir.

## 11 STEMİN ÇAKILMASI

Çimentosuz uygulamalarda *Stem Çakıcısı* (*Stem Impactor*) stemin tam yerleşmesi sağlanır.



## 12 A. UNİPOLAR BAŞ SABİTLEME

Yüzük (*A.Unipolar Ring*) üzerine yerleştirilen *A.Unipolar Baş* (*A.Unipolar Head*), *Femoral Baş Çakıcısı* (*Femoral Head Impactor*) çakılarak sabitlenir.

